

Letto imbottito ART-9200



DESCRIZIONE PRODOTTO

Letto da visita imbottito testiera inclinabile, completamente smontabile telaio in acciaio verniciato

AVVERTENZE

Prima di utilizzare il letto o iniziare il montaggio leggere con attenzione le istruzioni ed accertarsi della presenza di tutti i componenti

- Prima di utilizzare questo prodotto controllare che tutti i fissaggi siano serrati a fondo.
- Accertarsi che L'asta per regolazione sia inserita nella piastrina di bloccaggio.
- Il letto sostiene un peso massimo di 120kg.
- Il costruttore non può considerarsi responsabile per eventuali danni causati da usi impropri ed irragionevoli.

Nel caso si presentino dei cedimenti, rotture o anomalie in genere, contattare immediatamente l'installatore o il rivenditore.

MONTAGGIO



- Inserire la gamba posteriore (foto 1).
- Inserire la gamba anteriore (foto 2).
- Serrare i grani (foto 3).
- Inserire l'asta nella piastrina per il bloccaggio (foto 4).



- Per regolare l'altezza muovere le aste e accompagnare lo schienale.
- Assicurarsi che lo schienale sia bloccato prima di sdraiarsi.

3



4



5

